

Cool Drape Too

MAN & MACHINE

Mit unserer hochwertigen Tastaturabdeckung war Hygiene am Arbeitsplatz noch nie so einfach. Sie passt auf jede Tastatur und kann daraufgelegt oder komplett umwickelt werden.

Das transparente Cool Drape Too ist aus ultradünnem, latexfreiem Silikon gefertigt, sodass die Tasten sichtbar bleiben und gleichzeitig werden Keime und Verunreinigungen zuverlässig blockiert.

Die Reinigung ist mühelos: einfach abspülen, eintauchen, mit UV-Licht desinfizieren oder im Autoklav sterilisieren.

Langlebig, wiederverwendbar und praktisch – Cool Drape Too ist die perfekte Wahl für jede hygienebewusste Umgebung.



HYGIENISCH REINIGEN ABWASCHBAR

Entsprechend Ihrem Reinigungsprotokoll kann die Abdeckung eingetaucht, abgespült, besprüht oder mit Seife, Wasser und zugelassenen Reinigungsmitteln abgewischt werden.



DESINFIZIERBAR MIT STANDARD-DESINFIZIATIONSMITTELN

Beständig gegen die gängigsten Flächendesinfektionsmittel. Dadurch kann die Abdeckung nicht nur gereinigt, sondern auch desinfiziert werden. Behandeln Sie sie wie jede andere häufig berührte Oberfläche an Ihrem Arbeitsplatz.



STERILISIERBAR HÖCHSTE HYGIENESTANDARDS

Für maximale Hygiene entwickelt: Die Abdeckung kann wiederholt in einem Autoklav oder Thermodesinfektor bei bis zu 134°C sterilisiert werden.



LANGLEBIG WIEDERVERWENDBAR

Für eine lange Lebensdauer entworfen. Die Abdeckung hält wiederholten Reinigungen stand und kann sicher aufbewahrt oder jederzeit erneut verwendet werden.



TOP PERFORMANCE PERFEKTE KONTROLLE

Das rutschfeste Design sorgt für eine reibungslose und zuverlässige Bedienung der Tasten und des Touchpads und ermöglicht eine präzise Dateneingabe.



OPTIMALE TRANSPARENZ ANGENEHME HAPTİK

Die ultradünne Silikonfolie bietet maximale Transparenz und eine angenehme, weiche Haptik für ein reaktionsschnelles und komfortables Tippen.



Cool Drape Too

Reinigungsanweisungen

ZUGELASSENE REINIGUNGSMITTEL



Wasser und Seife.



Mit zugelassenen Flächendesinfektionsmitteln zu reinigen sowie Alkohol, Chlor $\leq 10\%$, Formaldehyd $\leq 37\%$, Glutaraldehyd, Phenol oder Quartär-Ammonium $\leq 2\%$ oder Oxidationsmittel wie Wasserstoffperoxid $\leq 3\%$.

ZUGELASSENE REINIGUNGS- & STERILISATIONSMETHODEN



Sie können das Produkt mit Hilfe eines weichen nicht scheuernden Tuchs (z.B. Mikrofaser), einem Desinfektionstuch, einer sehr weichen Bürste, vergleichbar mit der Steifheit eines Pinsels oder eines sehr weichen, nicht scheuernden Schwamms vollständig abwischen.



Sie können auf das Produkt sprühen.



Sie können das Produkt abspülen.



Sie können das Produkt kurz eintauchen, ausgenommen dem USB-Anschluss.



Sie können dem Produkt Wasserstoffperoxiddampfaussetzen (WPD).



Sie können das Produkt in einem Autoklav oder Thermodesinfektor sterilisieren (bis zu 134 °C, getestet bei 200 Zyklen).



Sie können dem Produkt UV-Licht-Desinfektion aussetzen.

Produktspezifikationen

PRODUKTBESCHREIBUNG Transparente Schutzfolie aus Silikon für jede Tastatur geeignet

MATERIAL Latexfreies Silikon

GARANTIE Es gilt keine Herstellergarantie

KONFORMITÄT CE

FARBE Transparent

ABMESSUNGEN 45 x 25 cm

GEWICHT Netto 50 g, 200 g per 4er-Pack

LAGERTEMPERATUR -20 °C bis 70 °C

BETRIEBSTEMPERATUR 0 °C bis 70 °C; Sterilisierbar bis zu 134 °C

URSPRUNG Hergestellt in Taiwan nach unserem Design

